


Vous avez planifié une séance de rééducation visuelle avec la solution Eyesoft EMAA Home, veuillez vous assurer d'avoir pris connaissance des étapes suivantes avant de remettre le casque au patient.



Connexion Wifi

Pour connecter le casque au Wifi, choisissez "Configurer", sélectionnez votre réseau, puis entrez le mot de passe à l'aide du bouton central à droite du casque. Cette étape permet de s'assurer que la solution Eyesoft est bien à jour.

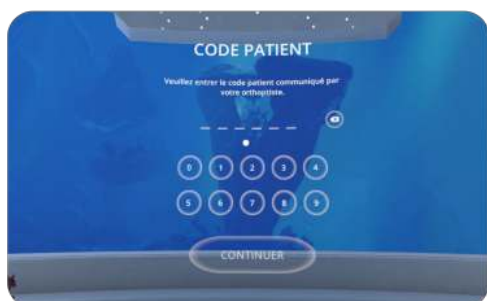


Connexion au casque

Saisissez le code patient situé sur sa fiche dans votre interface Eyesoft, puis allez sur "Continuer".



Séances programmées

Une fois la session du patient ouverte dans le casque, vérifiez que son nom est correct, puis sélectionnez "Mes séances" pour vous assurer que les séances programmées sont bien présentes.

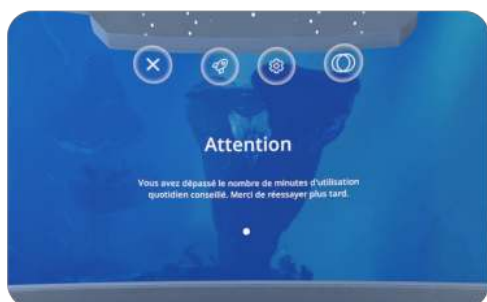

Limitation de temps

Si le casque n'a pas été éteint correctement ou est resté en veille (cf bouton On/Off), le message suivant peut apparaître : *"Attention, vous avez dépassé le nombre de minutes... Merci de réessayer plus tard."*

Eteignez le casque puis modifiez cette limite depuis votre interface, en accédant à l'onglet « Configuration » de la fiche patient : ajustez et enregistrez le nombre de minutes autorisées par jour.



Le support d'Eyesoft est disponible pour les orthoptistes ayant des questions concernant EMAA Home. Les demandes directement envoyées par les patients ne pourront pas être traitées. Veuillez lire attentivement la notice avant la première utilisation.