

Retrouvez nos vidéos tutorielles pour prendre en main le casque ici →



Bouton On/Off

→ Allumer le casque

Maintenez le bouton On/Off se trouvant sur le dessus du casque enfoncé pendant **5 secondes**.

→ Éteindre le casque

Maintenez le bouton On/Off sur le dessus du casque enfoncé pendant **5 secondes jusqu'à ce que la DEL clignote en bleu**.



Positionnement du casque

Après avoir installé le casque sur la tête du patient, il peut ajuster la position (inclinaison, hauteur et serrage) pour obtenir une vue claire de la tête affichée dans le casque. Si l'image reste floue, il est nécessaire de repositionner le casque.



Calibration

Pour chaque nouveau patient et au début de chaque séance, il est essentiel de procéder à la calibration. Pour cela, demandez au patient de viser "Calibrer" ou cliquez sur "Calibrer" depuis votre interface Eyesoft.



Réalignement de la VR

Pour sélectionner les paramètres, cliquez sur le bouton central ①

Si vous ne voyez pas le menu en face de vous dans le casque, vous pouvez réaligner l'environnement VR en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton ② en bas à droite du casque. Ou en cliquant sur ce bouton  qui se trouve en bas à droite de la page de suivi des exercices.



Veuillez lire attentivement la notice avant la première utilisation.