



Notice praticien

EMAA PRO - EMAA HOME

Guide d'utilisation EMAA Pro

1. Important avant utilisation	5
1.1. Avant la première utilisation	5
1.2. Recommandations techniques	6
Informations techniques	6
Navigateur Web	6
1.3. Débit Internet Recommandé	6
1.4. Configuration des ports	7
2. Destination et indications	8
3. Première mise en route	9
3.1. Ergonomie du casque	9
3.2. Allumage	10
3.3. Réalignement de la VR	10
3.4. Navigation et interaction dans le casque	11
3.5. Configuration Wifi	11
3.6. Configuration de votre code praticien	13
3.7. Configuration des manettes	13
4. Utilisation de l'interface	16
4.1. Environnement d'accueil EMAA Pro (dans le casque)	16
Positionnement du casque	16
Fonctionnalités du casque	19
Environnement par défaut	19
Taille du pointeur de sélection intuitive	20
4.2. Login praticien / interface web	21
4.3. Liste patients	21
4.4. Mon profil	22
4.5. Info & Support	22

Assistance technique	23
Notices	23
Configuration réseau	23
FAQ	23
Vidéos tutos	24
Astuces	24
Études cliniques	24
Webinaires	25
Mises à jour	25
4.6. Statut du casque	25
4.7. Tableau de bord	26
4.8. Historique	26
4.9. Gestion des séances	27
Lancement un entraînement	27
Sélectionner les niveaux/répétitions	27
Récapitulatif des exercices	28
Liste des appareils disponibles	28
Démarrer la séance	29
Suivi en temps réel	29
Rafraîchir / Rechercher casque	30
Barre des tâches / file d'attente	30
Recentrage / réalignement du casque	31
Manettes	31
Zoom VR	32
Pause	32
Arrêt de la séance	32
4.10. Séances / évaluations types	33
Création de séances ou évaluations types générales (accessibles pour tous les patients)	33

Création d'une séance type dédiée à un patient	34
4.11. Exercices	35
Poursuites	35
Saccades	35
PPC	35
Diplopie physiologique	35
Coordination tête-oeil	36
Coordination oeil-main	36
Fusion convergence	36
Convergence volontaire	36
Fusion stéréo convergence	36
Fusion divergence	37
Divergence volontaire	37
Fusion stéréo divergence	37
Mode personnalisé	37
Fusion personnalisée	37
4.12. Séances programmées / Télé-rééducation (EMAA Home) . .	38
Gestion des programmes	38
Notifications des programmes effectués	39
Filtrage des téléconsultations	40
Temps d'utilisation	40



Fabricant :
Eyesoft SAS - 12 bis rue Léon Jouhaux
33149 VILLENAVE-D'ORNON - FRANCE

1. Important avant utilisation

1.1. Avant la première utilisation

Bienvenue sur le guide d'utilisation de votre solution EMAA Pro.

Avant de démarrer votre 1ère utilisation de la solution et de la plateforme, veuillez lire attentivement les informations suivantes :

- Conservez l'emballage d'origine ainsi que la notice du constructeur afin de pouvoir vous y référer pour les fonctionnalités avancées du casque.
- Un accès Wifi (stable) est indispensable pour connecter le casque (si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser la connexion de votre mobile en utilisant le partage de connexion).
- Sécurisez l'environnement proche pour éviter les chocs et chutes, privilégiez une utilisation assise.
- Nous vous rappelons que tout dommage lié à une mauvaise utilisation (bris, casse, exposition des optiques) sera à votre charge.
- Nettoyage du cuir avant ou après chaque utilisation : privilégiez une solution douce (lingettes désinfectantes sans alcool) pour limiter l'usure prématurée.
- Le rechargement du casque est conseillé toutes les deux heures.
- Vous pouvez déclarer tout incident grave survenu en lien avec le dispositif à contact@eyesoft.fr ou à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
- En cas de dysfonctionnement du dispositif, veuillez contacter Eyesoft.



Ne jamais exposer les optiques à la lumière directe !

1.2. Recommandations techniques

INFORMATIONS TECHNIQUES

Pour le casque, une résolution minimum 4K RGB est recommandée avec un taux de rafraîchissement de 75 hertz, une densité de pixels supérieure à 800px, un FOV (Field Of View) de plus de 90° et un espace de stockage de 32Go minimum.

NAVIGATEUR WEB

La solution EMAA Pro équipée du système d'exploitation Android est compatible avec les navigateurs Chrome (V≥88), Firefox (V≥87) et Safari (V≥15.6).

1.3. Débit Internet Recommandé

- En envoi (upload / montant / sortant) : **5 Mbps** de débit
- En réception (download / entrant) : **5 Mbps** de débit permettent l'utilisation de l'interface Eyesoft mais l'affichage de certaines données sur l'interface peut être ralenti. Un débit de **25 Mbps** est recommandé pour une expérience optimale.
- Latence (Ping) : **60 Ms Ou Inférieur.**

Le bon fonctionnement d'Eyesoft n'est pas garanti pour des débits inférieurs à 5 Mbps en envoi ou en réception.

Dans certains cas, une mauvaise stabilité de votre réseau est également susceptible de perturber l'expérience malgré un débit satisfaisant. Il est recommandé d'évaluer la stabilité sur des sites dédiés.

1.4. Configuration des ports

- Réseau wifi protégé et privé
- **app.eyesoft.fr** soit disponible sur le **port 443 (HTTPS)**
- **api.eyesoft.fr** soit disponible sur le **port 443 (HTTPS)**
- **api.hads.eyesoft.fr** soit disponible sur le **port 443 (HTTPS)**
- **stun.eyesoft.fr** soit disponible sur le **port 5349**
- **iot.fr-par.scw.cloud** disponible sur le **port 1883 et 8883 (MQTT)**
- **websocket.iot.fr-par.scw.cloud** disponible sur le port 80 et 4 (Websocket)
- **www.eyesoft.fr** disponible sur le **port 443 (HTTPS)**

2. Destination et indications

EMAA Pro est un dispositif médical logiciel de réalité étendue destiné à l'analyse et à la réhabilitation des fonctions visuelles et oculomotrices.

La solution a pour but l'aide à l'évaluation, le travail et l'amélioration des capacités oculo-motrices afin de soulager les symptômes.

Son utilisation est indiquée pour l'aide à l'évaluation et la rééducation des patients souffrant de déséquilibres oculomoteurs, âgés de plus de 8 ans (sous surveillance d'un adulte pour les mineurs), dont la correspondance cortico-rétinienne est normale (CRN). Elle ne doit pas excéder 20min par séance et une séance par jour.

Comme toute pratique orthoptique, le dispositif est susceptible d'entraîner certains effets transitoires (inconfort visuel, maux de tête, nausées, vertiges).



Les patients ayant des antécédents de troubles vestibulaires ou neurologiques (convulsions, épilepsie, ou autre trouble neurologique majeur) sont particulièrement sujets aux effets indésirables décrits cidessus. Pour ces patients, il est recommandé d'évaluer spécifiquement la pertinence d'inclure la solution EMAA dans la prise en charge orthoptique du patient et de l'informer des effets indésirables potentiels liés à ses antécédents.

Avant l'utilisation de la Plateforme en télésoin dans le cadre de l'offre EMAA Home, l'orthoptiste reconnaît avoir connaissance de l'Avenant n° 14 relatif au recours au télésoin, avenant à la Convention Nationale organisant les rapports entre les Orthoptistes et l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie. L'avis de cet Avenant n° 14 daté du 28 octobre 2021 a été publié au Journal Officiel n° 0254 le 30 octobre 2021.

3. Première mise en route



3.1. Ergonomie du casque

Comme précisé dans les précautions, il est fortement recommandé de poser et retirer vous-même le casque au patient.

Positionnez les optiques devant les yeux du patient et passez les sangles derrière sa tête.

Une fois le casque positionné, ajustez en tournant la molette à l'arrière de la sangle réglable.

Vous gagnerez du temps et éviterez les mauvaises manipulations.



Lors du retrait, faites bien attention aux lunettes du patient, demandez-lui de les tenir.

3.2. Allumage



Maintenez enfoncée pendant 5 sec la touche on/off se trouvant sur le dessus du casque.



Il s'agit de la même manipulation pour éteindre le casque.

3.3. Réalignement de la VR

Si vous ne voyez pas le menu en face de vous dans le casque, il est peut-être positionné derrière ou sur le côté dans la réalité virtuelle.



Vous pouvez simplement le réaligner en face de vous par un appui long sur la touche du bas sur le côté du casque.

Vous pouvez également ré-aligner les décors pendant la séance directement depuis votre [interface](#).

3.4. Navigation et interaction dans le casque

Vous pouvez valider les onglets dans la VR de deux manières différentes :



Soit par une sélection intuitive, il vous suffit de viser et laisser le curseur rond se remplir pendant 3 secondes.

Il s'agit du principal mode de sélection que votre patient devra comprendre pour utiliser EMAA Pro.




Soit en visant (diriger le pointeur blanc vers l'onglet) puis en cliquant sur la touche principale côté droit du casque.

Celle-ci sera utilisée principalement pour la configuration du wifi au début.

3.5. Configuration Wifi

Lors du premier démarrage, vous devrez configurer la

connexion WiFi.

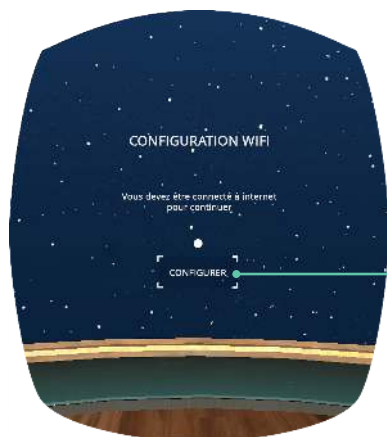

En utilisant la sélection intuitive, sélectionnez « configurer » pour entrer dans le menu réseau du casque.



Sélectionnez votre réseau, entrez la clé Wifi, validez, puis sortez du menu en cliquant sur la croix en bas, ou sur la touche « - » (bouton du haut sur le côté du casque).

Pour cette étape, vous devrez utiliser la sélection par clic (touche principale du casque).

Après cette étape, vous devrez entrer votre code praticien.



Pour gérer vos connexions Wifi , vous pouvez les retrouver en vous rendant sur l'onglet « réglages » dans la pièce d'accueil du casque.

3.6. Configuration de votre code praticien

En utilisant la sélection intuitive, entrez votre code à 6 chiffres (reçu par mail et présent sur le tableau de bord de votre interface web) puis validez « continuer ».




Vous arrivez alors sur la phase de positionnement du casque (étape préliminaire avant chaque utilisation).

3.7. Configuration des manettes



Allumez les manettes en appuyant sur les boutons « home » des manettes.

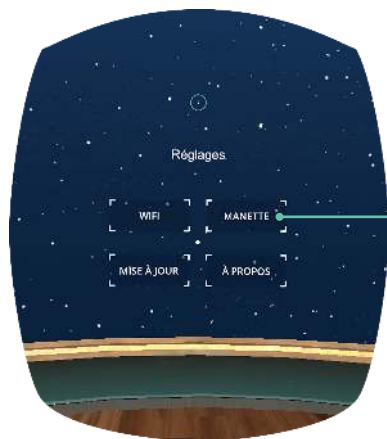

Dans le casque, lorsque vous êtes dans la pièce d'accueil, rendez-vous sur l'onglet paramètres (roue crantée en haut) puis sélectionnez « Manette ».

À l'aide de la touche **principale** du casque, sélectionnez l'onglet « manette » à gauche, laissez vous guider dans le casque pour associer / dissocier les manettes.

Sortez en appuyant sur le bouton « - » du casque pour retourner dans l'environnement Eyesoft.

La manette et le laser de visée apparaissent dans la VR, vous pouvez alors l'utiliser pour sélectionner avec la gâchette.

Pour recalibrer la manette et la visée, maintenez la touche « Home » 3 secondes. Restez appuyé 3 secondes sur le bouton « - » de la manette pour activer / désactiver rapidement la manette.



Vous pourrez activer / désactiver la manette directement depuis votre interface pendant la séance, en cliquant sur le bouton correspondant (cf section Gestion des séances)

Bravo ! Vous êtes maintenant prêts à utiliser EMAA Pro !

4. Utilisation de l'interface



4.1. Environnement d'accueil EMAA Pro (dans le casque)

POSITIONNEMENT DU CASQUE

Il s'agit de l'étape préliminaire avant chaque utilisation. Elle permet de positionner le casque de manière optimale.



Une fois le casque mis en place sur sa tête, le patient doit aligner la tête et voir correctement le dessin de la tête avec le casque.

S'il voit flou une partie du dessin, le casque doit être mieux positionné.

Vous pouvez demander au patient d'ajuster lui-même le casque comme demandé dans la VR.



Pensez à aligner les menus afin que le patient débute la séance avec les menus face à lui.



Veuillez noter que le casque reviendra automatiquement à cette étape s'il est retiré ou si vous cliquez sur la cible ronde près de l'onglet « Lancer ».



Utilité de la gommette

Elle vous permet de maintenir le casque hors veille. Lors de la prise en main au début, ou si vous souhaitez faire des tests vous-même (sans patient), collez la gommette sur le photorécepteur entre les optiques, cela vous permet d'éviter le retour systématique à la calibration.

FONCTIONNALITÉS DU CASQUE

1. Quitter la session :

Pour quitter la session, sélectionnez la croix puis confirmez. Le code praticien sera demandé afin d'ouvrir une nouvelle session.



2. Changer l'environnement :

Sélectionnez l'onglet en forme de fusée ou de poisson afin de passer d'un environnement à l'autre.

3. Accès aux réglages :

Sélectionnez l'onglet en forme de roue crantée pour accéder aux paramètres (manette, Wifi, ou mise à jour).

4. Repositionner / Recalibrer :

Sélectionnez l'onglet de droite pour revenir au « positionnement du casque ».

ENVIRONNEMENT PAR DÉFAUT

Il vous est possible de paramétrer l'environnement par défaut de votre casque. Le choix d'un environnement impacte les décors ainsi que les objets apparaissant pendant les exercices.




Rendez-vous dans votre profil et cliquez sur l'onglet **Paramètres**. Sélectionnez un univers parmi ceux proposés.

Ce choix s'appliquera pas défaut à tous vos patients mais pour chaque exercice vous pouvez configurer un thème différent lors du lancement d'une séance.



→ Univers spatial

C'est l'environnement "historique" de la solution EMAA Pro, il offre des contrastes marqués et des formes géométriques simples.

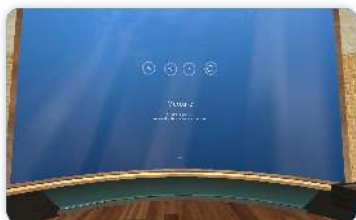

→ Univers aquatique

Cet environnement propose des formes plus organiques et des couleurs plus douces.

TAILLE DU POINTEUR DE SÉLECTION INTUITIVE

Vous pouvez également régler la taille par défaut du pointeur de sélection intuitive dans le casque. Ce réglage sera appliqué pour tous les patients mais vous pouvez le modifier pour chaque session.



Rendez-vous dans votre profil et cliquez sur l'onglet **Paramètres** et sélectionnez une des 3 tailles de pointeur proposées.

4.2. Login praticien / interface web

Sur la page d'accueil du site eyesoft.fr, sélectionnez « mon compte » en haut à droite pour entrer dans votre interface praticien.




Entrez votre identifiant (adresse mail) ainsi que votre mot de passe puis validez.



Une seule session doit être active à la fois, ne vous connectez pas à votre interface sur un autre onglet ou ordinateur en même temps.

4.3. Liste patients

Après vous être identifié, vous avez accès à votre liste de patients.

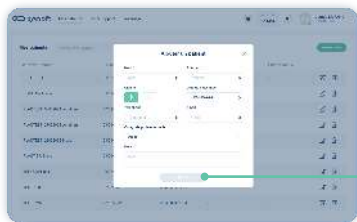

Pour créer un **nouveau patient**, sélectionnez le bouton vert en haut à droite. Complétez les données et cliquez sur « Ajouter » pour finaliser l'enregistrement de votre patient.

4.4. Mon profil



Vous pouvez accéder à vos informations patient et de facturation en cliquant sur votre nom puis en sélectionnant « **mon profil** ».


4.5. Info & Support

Vous trouverez dans cette section de nombreuses informations utiles regroupées par thématiques pour l'utilisation de votre solution EMAA Pro :



- 🧑🏻 Centre d'aide
- ? Astuces et tutoriels
- 📰 Actualités

ASSISTANCE TECHNIQUE

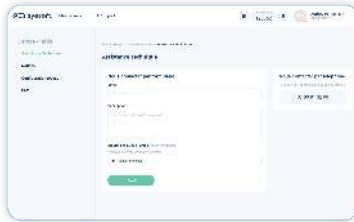

Vous pouvez nous contacter par le biais de ce formulaire de contact afin de nous faire part de difficultés que vous rencontrez avec votre solution EMMA Pro.

NOTICES



Vous retrouverez dans cette section l'ensemble des notices de vos solutions EMMA Pro 2 pour une consultation en ligne ou en PDF.

CONFIGURATION RÉSEAU




Pour vous informer sur les performances minimales nécessaires, tester ou configurer votre débit.

FAQ



Pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser sur l'utilisation ou d'éventuelles difficultés techniques.

VIDÉOS TUTOS

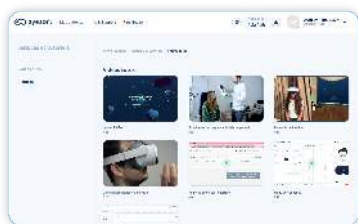

Pour vous aider à débiter et à utiliser au mieux les fonctionnalités disponibles.

ASTUCES



Pour vous informer des astuces et des bénéfices cliniques d'Eyesoft en pratique.

ÉTUDES CLINIQUES



Vous trouverez dans cette section une sélection d'études cliniques en lien avec votre pratique professionnelle.

WEBINAIRES



Des vidéos au format long des précédents webinaires proposés par Eyesoft.

MISES À JOUR



Les récapitulatifs des dernières nouveautés intégrées à chaque mise logicielle de votre solution EMAA.


4.6. Statut du casque

Le statut du casque apparaît au lancement de la séance (dans l'onglet de sélection de l'appareil), ainsi qu'en haut de page de l'exercice en cours, celui-ci peut être :

- Appareil non connecté (rouge) si en veille ou éteint
- Calibration en cours (jaune)
- Appareil disponible (bleu)
- Connexion active lorsque les test sont lancés (bleu)

4.7. Tableau de bord

Sur votre  **Tableau de bord**, vous retrouvez les informations suivantes :

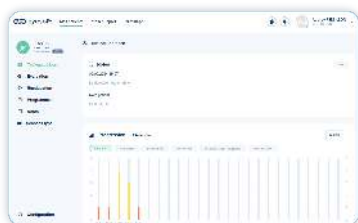

- Aperçu de l'historique récent
- Progrès patient
- Liste et durée de toutes les séances réalisées

4.8. Historique

Accessible dans l'onglet  **Rééducation**, le bloc  **Historique** répertorie l'ensemble des séances et exercices réalisés, avec leur réussite ou échec, ainsi que l'enregistrement des scores de « fusion personnalisée ». Il vous permet de suivre l'évolution et les progrès de vos patients.



Vous pouvez filtrer les informations qui vous intéressent pour un exercice donné, ou pour une période donnée, pour une meilleure visibilité.

4.9. Gestion des séances

Pour débiter une séance, rendez-vous sur le profil du patient concerné puis dans l'onglet **Reéducation**.

LANCEMENT UN ENTRAÎNEMENT



Cliquez sur « **Lancer un entraînement** », puis choisissez « **séance personnalisée** » ou « **séance type** ».

Choisissez les exercices dans la liste. Notez que les exercices se lanceront dans **l'ordre de votre sélection** (modifiable pendant la séance).

Sélectionnez ensuite les **niveaux** de chacun des exercices.

SÉLECTIONNER LES NIVEAUX/RÉPÉTITIONS



Plusieurs **niveaux** d'un même exercice peuvent être sélectionnés, et/ ou plusieurs **répétitions** d'un même niveau (dans ce cas, le nombre de répétitions est à indiquer dans la fenêtre récapitulative des exercices sélectionnés).




Pour les vergences, vous devez d'abord sélectionner « convergence », « divergence » ou « personnalisé », puis le type d'exercice (Fusion, Volontaire, ou Fusion stéréo)

RÉCAPITULATIF DES EXERCICES



Vérifiez vos choix dans le **récapitulatif** (vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des exercices/niveaux et ajuster les répétitions) et cliquez sur « suivant ».

LISTE DES APPAREILS DISPONIBLES

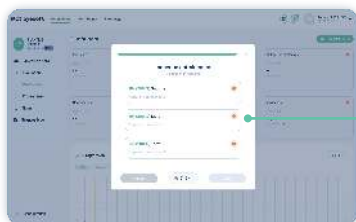


Le(s) appareil(s) s'affiche(nt) ainsi que leur disponibilité et leur niveau de batterie, choisissez votre casque puis cliquez sur « suivant ».



Vous pouvez sélectionner un casque même s'il est non connecté ou en cours de calibration, celui-ci passera en disponible dès que le partitionnement sera validé par le patient. Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon appareil !

DÉMARRER LA SÉANCE

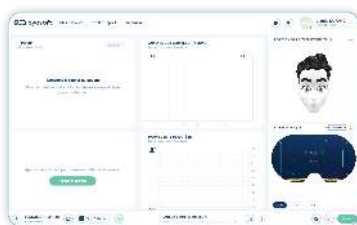

Une fois la connexion active, démarrez la séance en cliquant sur « **Lancer** » en bas à droite.


Chaque exercice se lance alors dans l'ordre sélectionné.



Vous pouvez commencer à préparer votre séance avant que le casque soit allumé / positionné sur la tête du patient.

Il est normal que les patients perçoivent le point blanc en double après un exercice de fusion ou de convergence (transitoire).

SUIVI EN TEMPS RÉEL

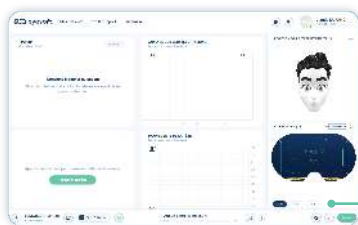


Vous pouvez suivre et visualiser en temps réel tout ce que voit le patient dans le casque. Vous pouvez afficher les deux yeux, ou uniquement OD/OG.

Chaque exercice utilisé par niveau se termine par la question « Avez-vous réussi l'exercice ? ». Vous pouvez demander au patient de répondre lui-même en visée intuitive, ou vous pouvez vous-même cliquer sur la réponse. Une fois la réponse validée, l'exercice suivant se lance automatiquement.

Une fois le dernier exercice terminé et validé, votre patient en sera notifié et sera redirigé dans l'environnement d'accueil.

RAFRAÎCHIR / RECHERCHER CASQUE

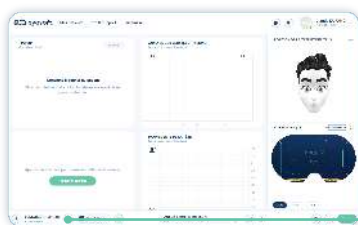

Si votre casque n'apparaît pas actif dans votre interface de gestion de séances, vous pouvez le rechercher en cliquant sur l'icône . S'il n'apparaît toujours pas actif, redémarrez le casque et relancez une séance.


BARRE DES TÂCHES / FILE D'ATTENTE



Vous pouvez afficher la liste d'exercices choisis pour la séance, supprimer / ajouter ou modifier l'ordre des exercices. En fonction de l'état de l'exercice plusieurs icônes peuvent s'afficher à gauche de l'exercice :


- **Triangle "lecture" vert** : Exercice en cours
- **Croix** : Exercice passé/non-réalisé
- **Pouce bleu** : Exercice réalisé et réussi
- **Pouce rouge** : Exercice réalisé mais en échec
- **Lettre** : Exercice à venir (ordre modifiable)

RECENTRAGE / RÉALIGNEMENT DU CASQUE

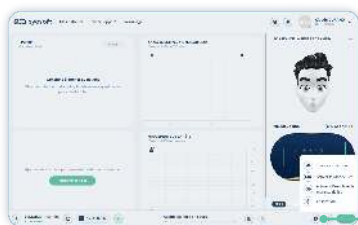


Pour éviter les déviations des décors dans le casque vous pouvez recalibrer le gyroscope directement depuis votre interface pendant la séance, en cliquant sur le bouton correspondant.

MANETTES

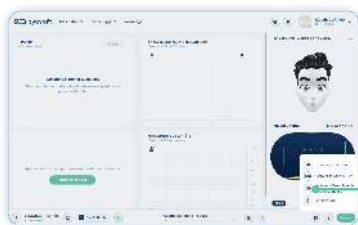


Vous pouvez activer / désactiver la ou les manettes directement depuis votre interface pendant la séance, en cliquant sur le bouton correspondant.

ZOOM VR

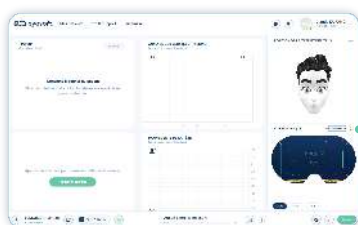

Vous pouvez modifier l'aperçu VR en cliquant sur l'onglet « agrandir » ou « réduire »

PAUSE

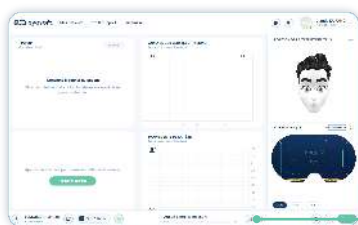

Vous pouvez mettre l'exercice pratiqué en pause en cliquant sur l'icône « pause ». Pour poursuivre l'exercice, cliquez à nouveau sur « pause ».

ARRÊT DE LA SÉANCE




→ Annuler

→ Terminer

Annule l'ensemble de la série d'exercices en cours (le patient sera redirigé dans la pièce d'accueil).

4.10. Séances / évaluations types

CRÉATION DE SÉANCES OU ÉVALUATIONS TYPES GÉNÉRALES (ACCESSIBLES POUR TOUS LES PATIENTS)

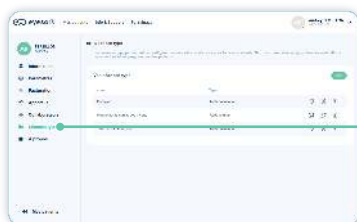

Rendez-vous sur votre profil (en cliquant sur votre nom en haut à droite dans votre interface), et sélectionnez l'onglet « Séances type ».



Cliquez sur « Créer », choisissez le nom de votre séance type, puis la destination de celle-ci (rééducation / évaluations / téléconsultation).

Vous pouvez également ajouter une description si vous le souhaitez.

Cliquez sur « suivant », sélectionnez l'ordre et le niveau des exercices souhaités, puis « Terminer ».



Les modes personnalisés ne sont pas accessibles pour la télé-consultation.

CRÉATION D'UNE SÉANCE TYPE DÉDIÉE À UN PATIENT



Vous pouvez créer des séances types dédiées à un patient. Notez qu'elles ne seront accessibles que pour le patient en question. Pour cela, rendez-vous sur la fiche patient, sélectionnez « séances type » dans les onglets de gauche. La manipulation est la même que précédemment.

4.11. Exercices

Voici les consignes pour chaque exercice et pour chaque environnement :

POURSUITES

« Suivez précisément le vaisseau des yeux sans bouger la tête »

« Suivez précisément le poisson sans bouger la tête »

SACCADES

« Fixez successivement le point lumineux de chaque planète sans bouger la tête »

« Fixez successivement le point lumineux de chaque tortue sans bouger la tête »

PPC

« Fixez le point central sur la planète en essayant de ne pas voir double »

« Fixez le point central sur la tortue en essayant de ne pas voir double »

DIPLOPIE PHYSIOLOGIQUE

« Fixez la planète, puis le vaisseau en suivant le rythme. L'élément illuminé doit être vu simple, vous devriez avoir l'impression de "loucher". Il est normal que l'élément sombre soit double. »

« Fixez la tortue, puis le poisson en suivant le rythme. L'élément

illuminé doit être vu simple, vous devriez avoir l'impression de "loucher". Il est normal que l'élément sombre soit double. »

COORDINATION TÊTE-OEIL

« Cherchez et sélectionnez successivement chaque planète à l'aide du point blanc, en visant avec les yeux ET la tête »

« Cherchez et sélectionnez successivement chaque tortue à l'aide du point blanc, en visant avec les yeux ET la tête »

COORDINATION OEIL-MAIN

« Cherchez et sélectionnez successivement chaque planète à l'aide de la manette, en appuyant sur la gâchette »

« Cherchez et sélectionnez successivement chaque tortue à l'aide de la manette, en appuyant sur la gâchette »

FUSION CONVERGENCE

« Fixez et maintenez l'image au centre tout au long de l'exercice. »

CONVERGENCE VOLONTAIRE

« Chaque œil voit une image différente. Vous devez faire l'effort volontaire de les recentrer ! »

FUSION STÉRÉO CONVERGENCE

« Essayez de ne pas voir double. Vous pouvez avoir l'impression que l'image change de taille, de position, ou qu'elle devient floue »

FUSION DIVERGENCE

« Fixez et maintenez l'image tout au long de l'exercice. »

DIVERGENCE VOLONTAIRE

« Chaque œil voit une image différente. Vos yeux doivent être relâchés pour les recentrer ! »

FUSION STÉRÉO DIVERGENCE

« L'image ne doit pas être vue double. Vos yeux doivent être relâchés pour maintenir la fusion »

MODE PERSONNALISÉ

Chaque exercice propose une déclinaison en mode personnalisé. Il vous permet de réaliser l'exercice en réglant les paramètres de taille, distance ou vitesse selon votre convenance.

Lorsque vous réalisez un exercice personnalisé, il ne sera pas enregistré dans l'historique (seule la fusion en mode personnalisé permet d'enregistrer les scores).

FUSION PERSONNALISÉE

Essayez de conserver la fusion, ou le centrage des images (pour la vergence volontaire)

4.12. Séances programmées / Télé-rééducation (EMAA Home)

GESTION DES PROGRAMMES

Pour débiter une séance, rendez-vous sur le profil du patient concerné puis dans l'onglet  **Programmes**.



Cliquez sur « **Ajouter un programme** ».


Donnez un nom à la séance, puis un nombre maximal d'utilisation autorisé.



Choisissez les exercices dans la liste. Sélectionnez ensuite les niveaux de chacun des exercices, de la même manière qu'une séance en cabinet, puis cliquez sur « **terminer** ».




Le nombre de programmes pouvant être ajoutés sont au maximum de 5 par patient. Ceux-ci s'affiche par ordre de saisie avec le dernier en premier dans votre interface. Au sein du casque l'affichage est inversé avec le premier programme saisi affiché en premier.

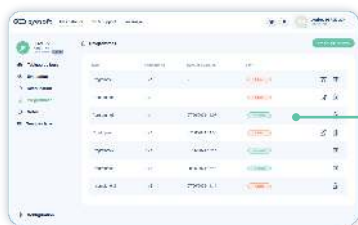

Une fois le programme créé, il apparaît dans la liste des programmes. Vous pouvez ensuite consulter leur statut (**À faire** ou **Effectué**), la date de réalisation, ou les supprimer

NOTIFICATIONS DES PROGRAMMES EFFECTUÉS

Lorsqu'un programme est réalisé par un de vos patients, vous en êtes informé dans l'onglet « notification » de la page principale de votre interface. Ceux-ci peuvent s'afficher suivant 3 typologies :

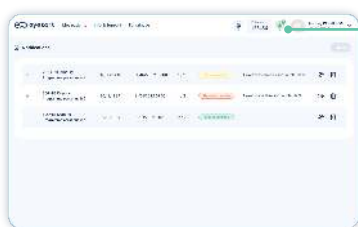


- **Séance incomplète** : le patient a lancé un programme et a réalisé moins de 3 exercices
- **Séance partielle** : le patient a lancé un programme, n'a pas fini le programme en entier et a réalisé 3 exercices ou plus
- **Séance terminée** : le programme a été réalisé en entier par le patient




Les résultats sont intégrés à la progression dans l'historique du patient !

FILTRAGE DES TÉLÉCONSULTATIONS

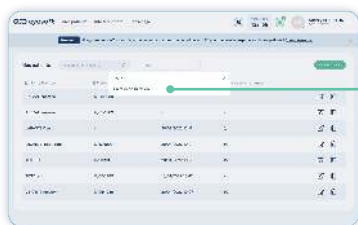

Dans « Mes patients », vous pouvez filtrer les patients en télésoin.

TEMPS D'UTILISATION

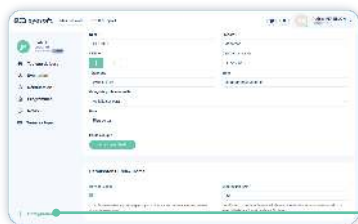

Le temps d'utilisation des casques* lors des programmes de rééducation HOME est configuré par défaut à 30min. Vous pouvez augmenter ou diminuer le temps d'utilisation pour chaque patient.

*Une utilisation prolongée de la réalité virtuelle peut provoquer des

migraines, nous conseillons de régler l'utilisation maximum journalière à 30 minutes.



Eyesoft SAS
12 bis rue Léon Jouhaux
33140 VILLENAVE-D'ORNON