



Guide de démarrage rapide

EMAA HOME



Veillez lire attentivement la notice détaillée avant la première utilisation.

VERSION INTERFACE WEB : V 2.4.0 | VERSION INTERFACE VR : V 1.8.0 / 3.2.1
VERSION NOTICE : V 2.16 | 2025-07-10



Fabricant :
Eyesoft SAS - 12 bis rue Léon Jouhaux
33149 VILLENAVE-D'ORNON - FRANCE

1. Allumage



Maintenez enfoncée pendant 5 sec la touche on/off se trouvant à droite, sous le casque.

i Il s'agit de la même manipulation pour éteindre le casque.

Indicateur LED du casque



Casque allumé (bleu fixe)



Casque en cours d'extinction (bleu clignotant)

Lorsque le casque est **éteint et branché** :



Batterie pleine - entre 98% et 100% (vert)



Batterie en cours de recharge - entre 20% et 98% (jaune/orange)



Batterie faible - inférieur à 20% (rouge)

Si le casque n'est pas branché et en dessous des 20% de batterie, vous pourrez observer un voyant rouge clignotant 



Les performances réseau du casque sont dégradées en dessous de 20%, assurez-vous d'avoir assez de batterie avant lancer votre séance.

2. Réalignement de la VR



Vous pouvez simplement réaligner le menu en face de vous par un appui long sur la touche du bas sur le côté du casque.

3. Navigation et interaction dans le casque



Vous pouvez valider les onglets dans la VR par une sélection intuitive :

Il vous suffit de viser et laisser le curseur rond se remplir pendant 3 secondes.



→ **Visez l'élément avec le pointeur blanc puis cliquez sur la touche ci-contre.**

4. Configuration WiFi

- Sélectionnez « configurer »
- Sélectionnez votre Wifi
- Entrez la clé (Sélection par clic*)
- Sortez du menu en cliquant sur la croix en bas, ou sur la touche « - » du casque.

5. Configuration de votre code patient

En utilisant la sélection intuitive, entrez votre code à 6 chiffres (remis par votre orthoptiste en cabinet) puis validez « continuer ».

6. Configuration de la manette



Allumez la manette en appuyant sur les boutons « home » de la manette.

La manette et le laser de visée apparaissent dans la VR, vous pouvez alors l'utiliser pour sélectionner avec la gâchette.

Pour recalibrer la manette et la visée, maintenez la touche « Home » 3 secondes. Restez appuyé 3 secondes sur le bouton « - » de la manette pour activer / désactiver rapidement la manette.

7. Mes séances

Après avoir positionné le casque, sélectionnez « Mes séances ».

Sélectionnez la séance, puis laissez-vous guider !

Restez bien concentré, faites la séance en intégralité, et répondez « OUI » uniquement si vous avez bien réussi l'exercice en question, vos résultats seront directement enregistrés chez votre orthoptiste.

Bravo ! Vous êtes maintenant prêts à utiliser EMAA Home !

8. Fonctionnalités du casque



1. Quitter la session :

Pour quitter la session, sélectionnez la croix puis confirmez. Le code praticien sera demandé afin d'ouvrir une nouvelle session.

2. Changer l'environnement :

Sélectionnez l'onglet en forme de fusée ou de poisson afin de passer d'un environnement à l'autre.

3. Accès aux réglages :

Sélectionnez l'onglet en forme de roue crantée pour accéder aux paramètres (manette, Wifi, ou mise à jour).

4. Repositionner / Recalibrer :

Sélectionnez l'onglet de droite pour revenir au « positionnement du casque ».

9. Fin de séance

Après votre séance, vous pouvez éteindre le casque (en restant appuyé 5 secondes sur la touche de démarrage).

La LED bleue clignotera quelques instants avant de s'éteindre complètement.

