

Solution de rééducation visuelle en réalité virtuelle

Votre orthoptiste a programmé une séance de rééducation visuelle spécialement pour vous grâce à la solution Eyesoft EMAA Home.



Retrouvez notre vidéo tuto pour prendre en main le casque ici →



Bouton On/Off

→ Allumer le casque

Maintenez le bouton On/Off se trouvant sur le dessus du casque enfoncé pendant **5 secondes**.

→ Éteindre le casque

Maintenez le bouton On/Off sur le dessus du casque enfoncé pendant **5 secondes jusqu'à ce que la DEL clignote en bleu**.



Connexion Wifi

Pour connecter le casque au Wifi, choisissez "Configurer", sélectionnez votre réseau, puis entrez le mot de passe à l'aide du bouton central à droite du casque. Cette étape permet de récupérer vos séances programmées par votre orthoptiste.



Lancer une séance

Pour accéder aux séances programmées par votre orthoptiste, sélectionnez "Mes séances", puis choisissez celle à effectuer.



Limitation de temps

Le message suivant peut s'afficher : *"Attention, vous avez dépassé le nombre de minutes... Merci de réessayer plus tard."*

Cette limite s'active lorsque le casque n'a pas été éteint correctement ou est resté en veille.

Vous pouvez contacter votre orthoptiste afin qu'il procède à la réinitialisation de cette limite.



Afin de vous garantir le meilleur accompagnement possible, votre orthoptiste se tient à votre disposition pour toute question. Veuillez lire attentivement la notice avant la première utilisation.